



# Autoclave para esterilización "Autester ST DRY PV 12" Clase B

CAPACIDAD: 12 LITROS.



Conforme a las directivas: 2014/68/UE equipos a presión, 3.3

NUEVO DISEÑO

## CARACTERÍSTICAS

Cámara interior en acero inox.  
 Purgado por vacío fraccionado.  
 Secado por vacío.  
 Generador de vapor externo.  
 Depósito de agua para alimentar la caldera.  
 Gran penetración en productos porosos.  
 Útil en estomatología, oftalmología, quirófanos, etc.

## SEGURIDAD


**Válvula de seguridad.** Previene que la presión sobrepase el límite máximo.

**Termostato de seguridad.** Desconecta la calefacción en caso de sobrettemperatura o falta de agua en el depósito.

**Envoltorio de protección térmica de la tapa.**



## PANEL DE MANDOS

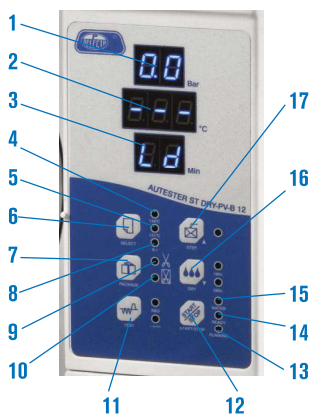

- 1. Indicador de presión (bar).
- 2. Indicador de temperatura (°C).
- 3. Indicador de tiempo (min.).
- 4. 134 °C.
- 5. 121 °C.
- 6. Selección de programa.
- 7. Selección embalados / no embalados.
- 8. Textiles.
- 9. Sólidos no embalados.

- 10. Sólidos embalados.
- 11. Test.
- 12. Pre calentamiento.
- 13. Ciclo de esterilización en marcha.
- 14. Autoclave listo para la puesta en marcha.
- 15. Indicador nivel bajo de agua.
- 16. Secado rápido (1 o 5 minutos).
- 17. Mantenimiento de temperatura de la cámara.

CONTROL DE TEMPERATURA Y CICLO POR MICROPROCESADOR AUTOMÁTICO.

CICLOS	134 °C Embalado	134 °C No Embalado	121 °C Embalado	121 °C No Embalado	Textiles	Test Bowie Dick	Test Vacío
Temperatura esterilización	134 °C	134 °C	121 °C	121 °C	134 °C	134 °C	-
Presión de esterilización	2,1 bar	2,1 bar	1,1 bar	1,1 bar	2,1 bar	-	2,1 bar
Tiempo de vacío	8 min.	4 min.	8 min.	4 min.	8 min.	-	-
Tiempo de esterilización	12 min.	4 min.	30 min.	20 min.	12 min.	3,5 min.	10 min.
Tiempo de secado	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	15 min.	1 min.	-

MODELO	Código	Capacidad litros	Ø / fondo cm		Medidas externas cm			Medidas bandejas cm			Consumo W	Peso kg
			Alto	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
AUTESTER ST DRY PV B 12	4001737	12	20	35	39,2	48,7	60	1,8	14	29,5	1800	42,2



Se suministra con: Una junta de recambio, llave de ajuste puerta, soporte con tres bandejas, pinza extractora, filtro de agua de vaciado y tubo salida de agua.

## ACCESORIOS

### Impresora térmica.

Papel de 2 1/4" (56 mm) de ancho.  
 Incluye cable de comunicaciones y alimentador.  
 Tensión de alimentación: DC 5V 3A

Código 4120123

**Destilador de agua** especial para autoclaves. (Ver pág. 98)

**Selladoras.** (Ver pág. 96 y 97).

